

**Læg Auto Logic 110 topmadrassen** oven på en standard madras med slangesættet i fodenden af sengen og CPR enheden i hovedgærdet. Fastgør topmadrassen til standardmadrassen ved at spænde de fire lange remme rundt om standardmadrassens hjørner.

**Læg Auto Logic 200 madrassen** direkte på sengebunden med slangesættet i fodenden af sengen og CPR enheden i hovedgærdet. Remmene på madrassens underside fastgøres til sengens bevægelige dele for at sikre fastgørelse af madrassen.

Kontroller, at det røde skjold på CPR håndtaget, der er placeret i højre side af madrassens hovedgærde, er trykket i bund, så lyn-tømnings-ventilen er lukket.

Tilslut luftslangen på madrassen til studserne på siden af pumpen. Der skal lyde et "klik", så er det sat rigtigt i. Pumpen hænges på sengegavl i sengens fodende.

Tilslut pumpens el-ledning til el-nettet. (230V) El-ledningen lægges ind i kabelkanalen på madrassens langside, placeret på modsatte side af udtaget for luftslangen. Luk trykknapperne i kabelkanalen og ledningen er på plads.


Tænd for stikkontakt og derefter pumpe.

Pumpen indstiller automatisk den dynamiske funktion i forhold til brugerens vægt.

Evt. lagen lægges løst hen over Auto Logic 200

## Transport funktion

Frakobling:

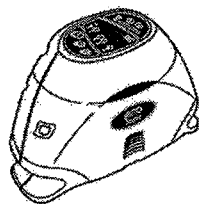


Sluk på stikkontakten tag el-ledningen ud.

Batterifunktionen sørger for fortsat dynamisk drift af madrassen

Tilkobling:

Sæt el-ledningen i stikkontakten og tænd.

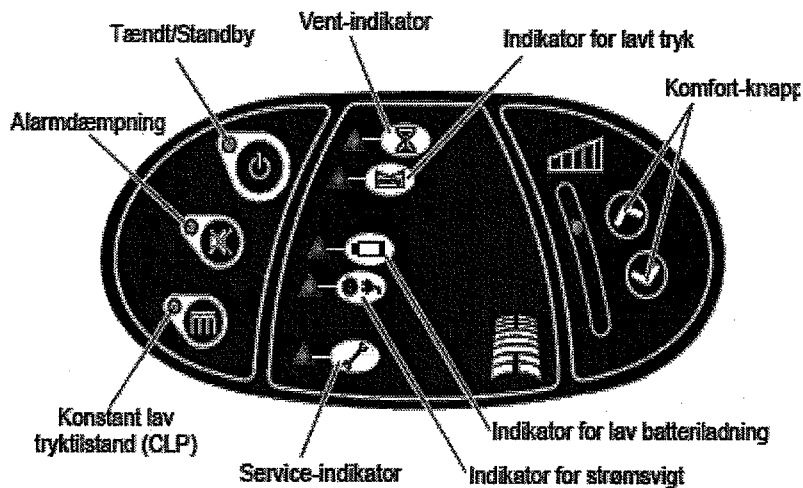

## Ved hjertestop – Tryk samtidig på de to udløsnings bøjler på begge sider af CPR kontrolenheden

For yderligere information henvises til Brugerhåndbog i afdelingens produktmappe fra ArjoHuntleigh eller kontakt os på tlf. 49 13 84 86.

## Fejlfinding

Følgende skema indeholder vejledning til fejlfinding ved **Auto Logic** og **Aura Logic** systemerne i tilfælde af fejlfunktioner.

Indikator	Mulig årsag	Afhjælpning
<p><b>LAVT TRYK og VENT</b></p> 	<p>Pumpen pumper madrassen/ sædepuden op.</p> <p>CPR er ikke helt lukket.</p>	<p>Begge indikatorer slukker, når driftstrykket er genetableret.</p> <p>Luk CPR-enheden.</p>
<p><b>LAVT TRYK</b></p> 	<p>Slangesættet er ikke tilsluttet korrekt.</p> <p>CPR er ikke helt lukket.</p> <p>Der er en utæthed i systemet.</p>	<p>Kontrollér slangesættets konnektor og sørg for at den er korrekt tilsluttet til pumpen.</p> <p>Luk CPR-enheden.</p> <p>Ring efter en servicetekniker.</p>
<p><b>STRØMSVIGT</b></p> 	<p>Strømmen er koblet fra pumpen.</p>	<p>Tilslut strøm eller sluk for pumpen.</p> <p>Hvis der anvendes et helt opladet batteri, fortsætter pumpen med at fungere i mindst 8 timer.</p>
<p><b>LAV BATTERILADNING</b></p> 	<p>Lav batterilevetid.</p>	<p>Isæt et fuldt opladet batteri.</p> <p>Oplad batteriet ved at bruge netspænding til drift af pumpen.</p>
<p><b>SERVICE (LYSER)</b></p> 	<p>Pumpen skal serviceres.</p>	<p>Ring efter en servicetekniker.</p> <p><i>Se hvordan du finder serienummeret på pumpen, madrassen eller sædepuden under "Serienumre" på side 25.</i></p>
<p><b>SERVICE (BLINKER)</b></p> 	<p>Pumpen har registreret en intern fejl.</p>	<p>Sluk for pumpen og tilkald en servicetekniker.</p>