

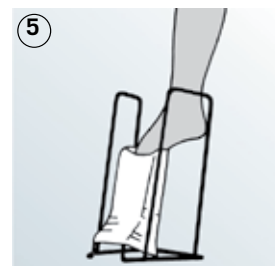


Brugsanvisning Butler metalstativ REHA


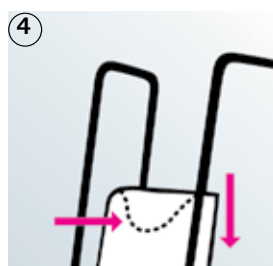


Påtagning:

- 1) Sæt metalstativet på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod Dem selv, og åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad
- 2) Sæt kompressionsstrømpen i bøjljen med strømpetåen vendt fremad
- 3) Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kant af strømpen
- 4) Før strømpen ned over bøjljen, indtil hælen kommer til syne ved kanten af bøjljen
- 5) Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen - støt Dem evt. til bord eller lign.

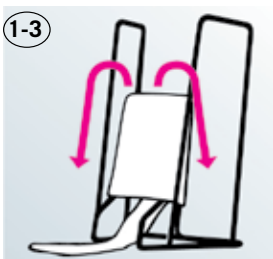

- 6) Træd nu ind i stativet - kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret
- 7) Ved skiftevis at trække i håndtagene, kan De nu føre strømpen op mod knæet
- 8) Når strømpen er lige under knæet, skal De vippe metalstativet let tilbage og fjerne det fra strømpen
- 9) Slut af med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad - sørg for at trække strømpen op stykke for stykke, uden at samle den sammen eller trække i kanten

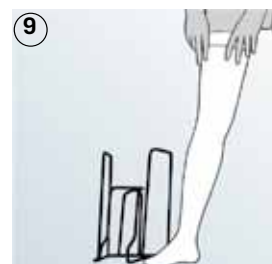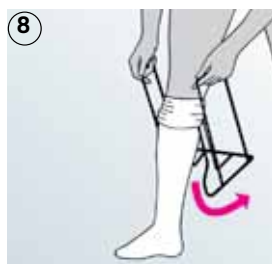

Mål

Butler metalstativ REHA

Butler metalstativ med variable håndtag

Mellem håndtagene bagerst = 28 cm.

Mellem håndtagene forrest = 25 cm.

Højde **A1** = 55 cm.

Bredde **A2** = 32,5 cm.

Dybde **A3** = 19,5 cm.

Dybde nedslået = 24 cm.

Løft op i håndtaget **1** for at udløse foldemekanismen

Bredde strømpeareal **A4** = 10 cm.

Vægt: 2,2 kg.

