



Instruktionsguide til

# DressBuddy Påtager

Beregnet til påtagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Henvender sig til borgere med nedsat bevægelighed i ankel, samt borgere med hel eller delvis lammelse.

Det er muligt at tage kompressionsstrømperne på med én hånd.

I sættet medfølger friktionsplade og glide-stykke som tilbehør.



| HMI-nr. | Varenr. | Varetekst                              | Person mål       |                 | Stativ mål  |             |
|---------|---------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|
|         |         |  | Personhøjde i cm | Lægomkreds i cm | Bredde i cm | Længde i cm |
| 72538   | 1030    | SÆT - 3 dele - PÅTAGER - MELLE         | Op til 185       | Op til 40       | 16          | 50          |
| 74607   | 1031    | SÆT - 3 dele - PÅTAGER - LANG          | Over 185         | Op til 40       | 16          | 60          |
| 74608   | 1028    | SÆT - 3 dele - PÅTAGER - MELLE OG BRED | Op til 185       | Over 40         | 19          | 50          |
| 74609   | 1029    | SÆT - 3 dele - PÅTAGER - LANG OG BRED  | Over 185         | Over 40         | 19          | 60          |
| 72539   | 2040    | ENKELT STK. - PÅTAGER - MELLE          | Op til 185       | Op til 40       | 16          | 50          |
| 74610   | 2041    | ENKELT STK. - PÅTAGER - LANG           | Over 185         | Op til 40       | 16          | 60          |
| 74611   | 2042    | ENKELT STK. - PÅTAGER - MELLE OG BRED  | Op til 185       | Over 40         | 19          | 50          |
| 74612   | 2043    | ENKELT STK. - PÅTAGER - LANG OG BRED   | Over 185         | Over 40         | 19          | 60          |

**Materiale:** Rustfri stål.

**Rengøring:** DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Slip-Fod og friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube  
video



HMI-Basen  
Manual



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere


# Påtagning



**1.** Placér friktionspladen på gulvet mellem fødderne.



**6.** Træk strømpen halvt op på læggen.

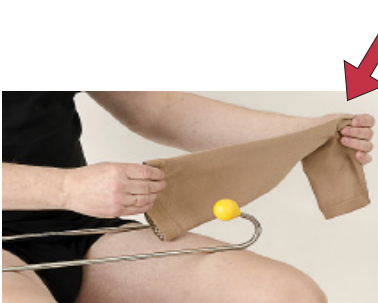

**2.** Læg DressBuddy'en på lårene med de gule kugler opad. Læg strømpen med hælen opad.



**7.** Gnid hælen fremad på friktionspladen med små korte ryk, så strømpen kommer på plads ved hælen.



**3.** Sæt strømpens kantbånd på en kugle ad gangen.



**8.** Træk i DressBuddy'en indtil strømpen er helt på.



**4.** Put slippen ned i strømpen. Brug den ende på slippen uden velcrolukning.



**10.** Tag kantbåndet af kuglerne og træk i den del af slippen, som vender væk fra huden.



**5.** Lad de gule kugler pege ind mod dig, før foden ind i strømpen og træk op i DressBuddy'en.



# Tips og tricks



**1.** Hvis borgerens tæer er tilbøjelige til at sidde fast i strømpen --> Anvend den ende af slippen med velcrolukning, så tæerne kan "pakkes ind" i slippen.



**2.** Hvis borgeren har problemer med at få foden helt ind i strømpen --> Drej da DressBuddy'en rundt om hælen, samtidig med at du trækker i den.



**3.** Hvis borgeren har svært ved at få foden helt ned i strømpen --> Skyldes det ofte, at de gule kugler sidder for langt nede i strømpen og derved mindsker elasticiteten. Husk at de gule kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet i strømpen (billedet).



**4.** Hvis der er folder på strømpen --> Før de gule kugler hen over folderne, så de forsvinder.





# Hvem er vi?

*Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.*

*Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.*

*Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.*

*Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.*

*Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.*



## Danish CARE Supply

*- fremtidens hjælpemidler*

### Danish CARE Supply

Agerskallet 1

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)



Følg os på

**facebook**

[facebook.com/danishcaresupply](https://facebook.com/danishcaresupply)