



Instruktionsguide til

# DressBuddy Aftager

Beregnet til aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Henvender sig til borgere, der skal være selvhjulpne i aftagning og som ikke kan bukke sig ned og nå sine fødder.

Det er muligt at tage kompressionsstrømperne af med én hånd. I sættet medfølger friktionsplade som tilbehør.



HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Person mål		Stativ mål	
			Personhøjde i cm	Lægomkreds i cm	Bredde i cm	Længde i cm
72542	1032	SÆT - 2 dele - AFTAGER - MELLEME	Op til 185	Op til 40	16	60
74617	1033	SÆT - 2 dele - AFTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
73687	1034	SÆT - 2 dele - AFTAGER - MELLEME OG BRED	Op til 185	Over 40	19	60
74616	1035	SÆT - 2 dele - AFTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70
72541	2022	ENKELT - AFTAGER - MELLEME	Op til 185	Op til 40	16	60
74613	2023	ENKELT - AFTAGER - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
73686	2024	ENKELT - AFTAGER - MELLEME OG BRED	Op til 185	Over 40	19	60
74615	2025	ENKELT - AFTAGER - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

**Materiale:** Rustfri stål.

**Rengøring:** DressBuddy kan afvaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask. Friktionsplade kan vaskes i hånden ved max 30° C.



Youtube  
video



HMI-Basen  
Manual



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

*Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere*

# Aftagning



**1.** Læg friktionspladen på gulvet mellem fødderne.



**2.** Sæt de blå kugler på DressBuddy'en lige indenfor kantbåndet bag på læggen.



**3.** Skub DressBuddy'en ned langs benet og sæt den på friktionspladen.



**4.** Træk benet bagud, så strømpen trækkes ned til anklen.



**5.** Gnid hælen fremad på friktionspladen med små korte ryk.



**6.** Indtil strømpen er helt af foden.





**1.** Hvis borgeren har sårbar hud --> Lav en fold på strømpen ved aftagning, så kuglerne ikke kommer i berøring med huden.



**2.** Hvis borgeren har svært ved at anvende friktionspladen eksempelvis pga. for få kræfter i benet eller vanskeligheder ved at koordinere bevægelsen --> Anvend DressBuddy aftager på hjul (billedet).



**3.** Hvis borgeren har svært ved at få foden ud af strømpen--> Det skyldes ofte at de blå kugler sidder for langt nede i strømpen eller for langt fremme i strømpen og derved mindskes elasticiteten. Husk at de blå kugler skal sidde på kantbåndet for størst mulig elasticitet og bagpå benet (billedet).



**4.** Hvis borgeren ikke har kræfter til at skubbe strømpen af --> Anvend andet glidestykke eksempelvis Slip åben tå, Easy of.



**5.** Elektrisk aftager ORT.O.MATE.

Til borgere som ikke kan blive selvhjulpne i aftagning af kompressionsstrømper ved brug af andre typer hjælpemidler.

# Hvem er vi?



*Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kommuner.*

*Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, badet, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.*

*Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste hjælperne i deres arbejde med borgerne.*

*Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.*

*Vi står klar med gode råd og vejledning i brugen af alle vores hjælpemidler.*



## Danish CARE Supply

*- fremtidens hjælpemidler*

### Danish CARE Supply

Sandgade 14

8900 Randers C

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)



Følg os på

**facebook**

[facebook.com/danishcaresupply](https://facebook.com/danishcaresupply)