




## DOLOMITE JAZZ

Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport.

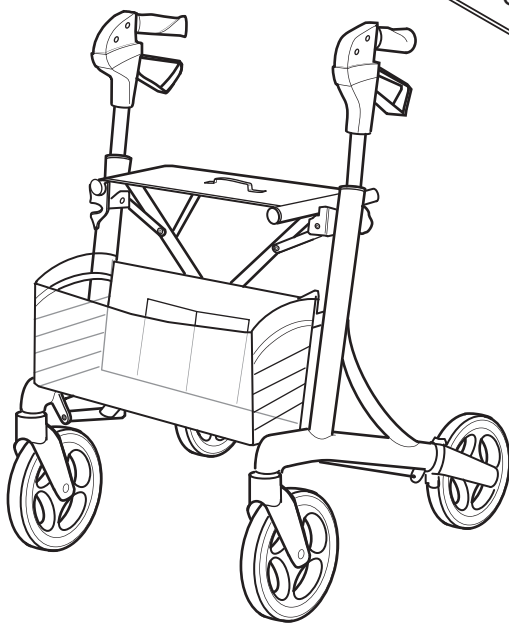

### BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug.  
Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug.





## SIKKERHED

- Det er forbudt at stå på rollatoren samt anvende den til persontransport.
- Anvend sædet til at sidde på.
- Når du sidder på rollatoren, skal begge bremsere være i parkeringsstilling.
- Parkeringsbremserne skal være i parkeringsstilling, når rollatoren bruges som støtte, fx når man rejser sig fra en stol.
- Sid aldrig og skub dig frem med fødderne.
- Gå ikke op eller ned ad trapper med rollatoren og brug den ikke på rulletrapper.
- Vær forsigtig ved skråt underlag.
- Rollatoren skal være helt udfældet, når du går med den. **BEMÆRK!** Må kun bruges som gangstøtte.
- Vær forsigtig, når kurven er tungt lastet. Last må kun transporteres i kurven eller på bakken. Maksimal last i kurven er 5 kg og på bakken 5 kg.
- Fjern beskyttelsesplasten fra hjulene før brug.
- Kørehåndtagene må ikke vinkles udad, da dette medfører, at rollatorens sidestabilitet forringes.

## MONTERING

- A) Montering af kurv.  
B) Montering af bakke.

## SAMMENKLAPNING

- C) Stå ved siden af rollatoren.  
Løft i remmen på sædet.  
**BEMÆRK!** Vær forsigtig ved sammenklap/ udfældning af rollatoren.

## TRANSPORTSTILLING






- D) Skub spærren for sammenklappet låsning over til transportstilling.

## KØREKLAR STILLING

- E) Fæld rollatoren ud ved at trykke på sæderørene. Kontrollér, at låsespærren er aktiveret før brug. **BEMÆRK!** Fare for at komme i klemme.

## TRINHJÆLP


- F) Anvend trindhjælpen til nemmere at overvinde mindre forhindringer som fx kanstene.

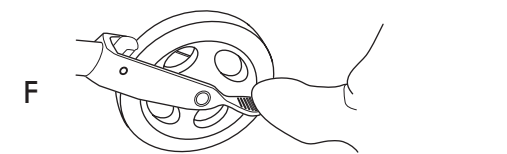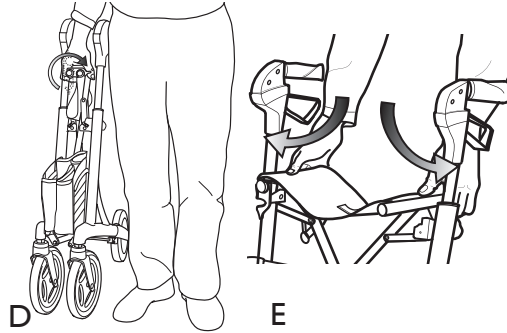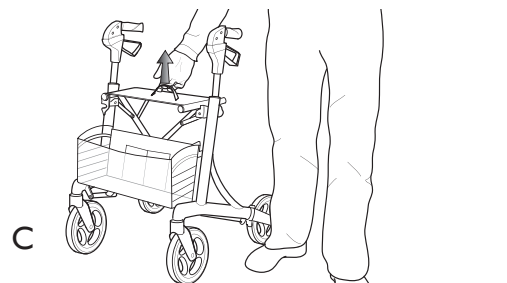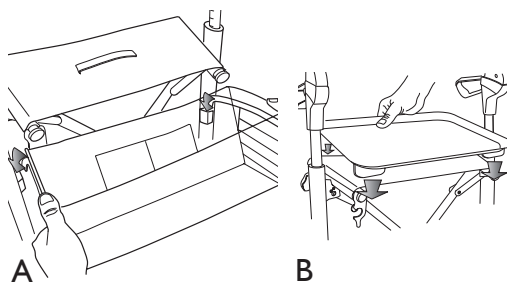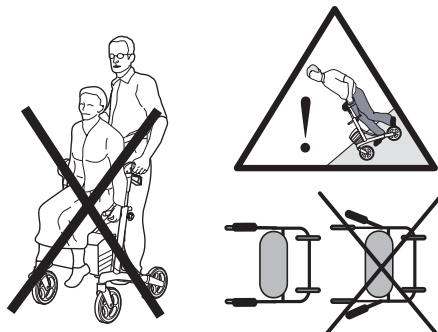

## BREMSER

G. Træk begge bremsehåndtag opad for at kørebremse.


G

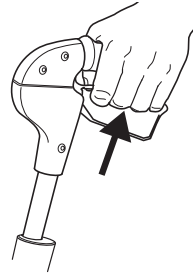

## PARKERINGSBREMSE

H. Tryk bremsehåndtagene blødt nedad for parkeringsstilling. Et tydeligt klik indikerer, at bremsen er i korrekt stilling. Det er vigtigt at begge bremses sættes i parkeringsstilling. For at frigøre bremsen løftes bremsehåndtagene opad. Når du sidder på rollatoren, skal begge bremses være i parkeringsstilling.


H

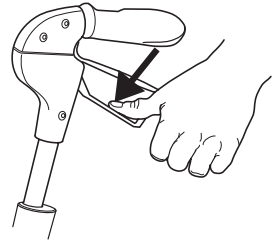

## JUSTERING AF BREMSEEFFEKT

I. Ved dårlig bremseeffekt justeres bremsewiren. Velegnet værktøj er faste skruenøgler, 7 og 10 mm (medfølger ikke).

I

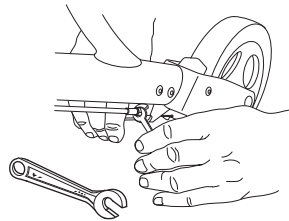


## KØREHÅNDTAG

Ved højdejustering af håndtag.

J. Stå bag rollatoren.


Normalt skal håndtagene være placerede i håndledshøjde.

J

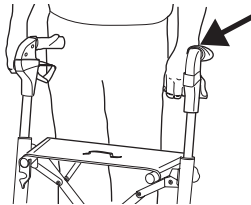

K. Løsn håndtagsrøret ved hjælp af grebet og justerér til egnet højde. Lås håndtagsrøret ved hjælp af grebet. Kontroller, at begge håndtag er ens indstillet.

K

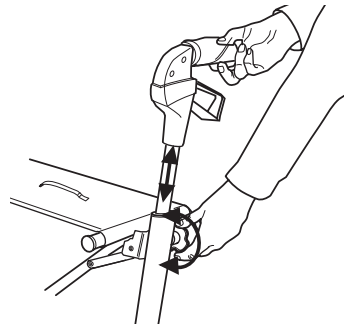

## VEDLIGEHOELDELSE - SIKKERHED

For at opretholde funktionen og sikkerheden bør man regelmæssigt sørge for at nedenstående foranstaltninger udføres:

- Gør rollatoren ren med almindeligt rengøringsmiddel. Tør den tør. Hold hjulene rene.
  - Kontrollér, at skruer og reguleringer er ordentligt spændt.
  - Hvis rollatoren ikke fungerer som den skal - tager du straks kontakt med din forhandler.
- En defekt rollator må ikke anvendes. Foretag ingen indgreb selv!

**BEMÆRK!** Må kun anvendes som gangstøtte.

Brugerens maksimale vægt: **DOLOMITE JAZZ** 130 kg.


Ved indgreb i rollatoren (tilpasninger, mangelfulde reparationer), uden **DOLOMITE**s kontrol, påtager vi os intet ansvar.

### ANVISNING FOR DESTRUKTION AF PRODUKT OG EMBALLAGE:


Når produktet kasseres, skal dette med tilbehør samt emballeringsmaterialet sorteres på den korrekte måde. De enkelte dele kan separeres og håndteres ifølge materialebetegnelsen.

På etiketten på **DOLOMITE JAZZ** findes de vigtigste tekniske informationer.

1. Varenummer.
2. Produktnavn.
3. Serienummer.
4. Fabrikationsdato.
5. Max brugervægt.
6. OBS! se brugsanvisningen.
7. Fabrikantens navn.
8. Maks. bredde på rollator
- 9: Producentens navn

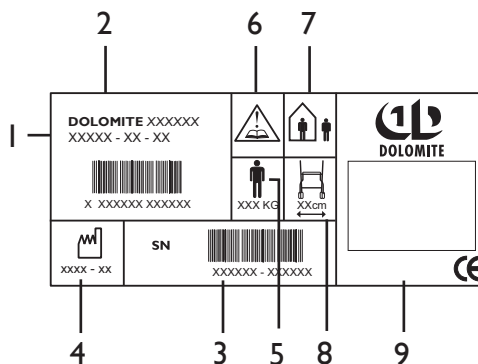

	520	600
A	62 cm	62 cm
B	67-81 cm	75-97 cm
C	39 cm	39 cm
D	43 cm	43 cm
E	52 cm	60 cm
F	67 cm	67 cm
Vægt:	7,2 kg	7,8 kg

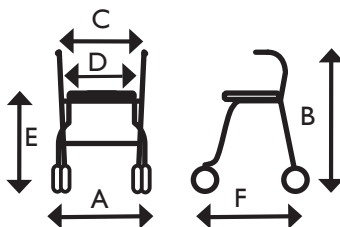

Diameter for- og baghjul: 20 cm



INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN  
TEL +46 (0476 535 00, FAX +46(0)476 535 99

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 39, DK-2605 Brøndby  
TEL (45) (0)36 90 00 00, FAX (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com