

Master TURNER

Large / X-Large Vendelagen

BRUGERVEJLEDNING




Master TURNER
Large Soft og Frotté



Master TURNER
Two In One Large Soft



Master TURNER
Two In One Large Frotté

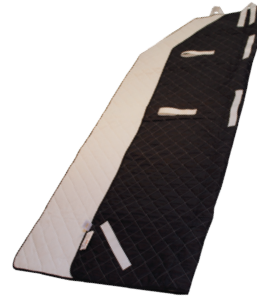

Master TURNER
Large Elastic



Master TURNER
Large X Frotté



Master TURNER
X-Large Soft og Frotté



Master TURNER
Two In One X-Large Soft



Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

| Vare | Art no. | Hmi no. | Produktbetegnelse | Model | Størrelse | *L/B | Vægt |
|------|-------------|---------|----------------------------------|---------|------------------|------|--------|
| | MC 001-1732 | 49368 | Master TURNER Large | Soft | L 215 x B 150 cm | L | 1540 g |
| | MC 001-1932 | 33250 | Master TURNER Large | Frotté | L 215 x B 150 cm | L | 1640 g |
| | MC 001-2540 | 49370 | Master TURNER Two In One Large | Soft | L 215 x B 145 cm | L | 2260 g |
| | MC 001-2040 | 42390 | Master TURNER Two In One Large | Frotté | L 215 x B 145 cm | B | 2000 g |
| | MC 001-1933 | 37162 | Master TURNER Elastic Large | Elastic | L 215 x B 145 cm | B | 1480 g |
| | MC 001-1999 | 40033 | Master TURNER X | Frotté | L 215 x B 150 cm | B | 1660 g |
| | MC 001-1742 | 54413 | Master TURNER X-Large | Soft | L 215 x B 200 cm | B | 2050 g |
| | MC 001-2032 | 40034 | Master TURNER X-Large | Frotté | L 215 x B 200 cm | B | 2180 g |
| | MC 001-2532 | 50298 | Master TURNER Two In One X-large | Soft | L 215 x B 200 cm | B | 3060 g |

* L=lagerware, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Master TURNER

Large / X-Large Vendelagen



A. Montering af Master TURNER




1A) Du har nu monteret det valgte madrascover på sengemadrasen. Sørg for, at stropperne ligger i højre side af sengen



2A) Placer nu Master TURNER med den sorte glatte del vendt mod madrascoveret, og etikken "Denne side op mod hovedenden" vender mod sengens hovedgavl



B. Vending i seng manuelt

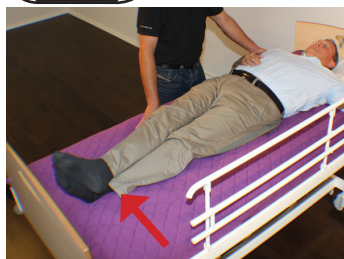

1B) Kryds/bøj brugerens ben, og træk hovedpude og skulder frem



2B) Hjælperne på hver side trækker og skubber bruger mod ønsket sengekant




3B) Den ene hjælpe holder imod på brugerens krop, mens den anden hjælper ved hjælp af vægtoverføring og Master TURNER ruller bruger om i sideleje




4B) Brugeren er nu vendt i sideleje, og Master TURNER kan ruller sammen og anvendes som kile langs brugerens krop




C. Vending i seng med lift

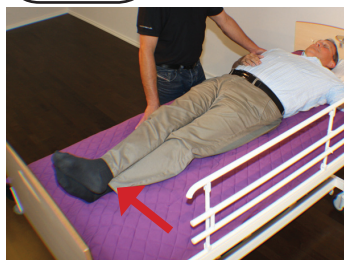

1C) Kryds/bøj brugerens ben, og træk hovedpude og skulder frem

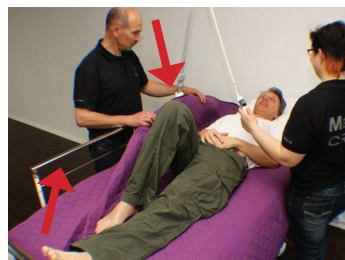

2C) Monter Master TURNER's stropper på liftens åg, og elever sengehest

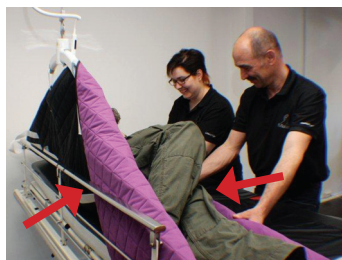


3C) Brugeren lifies ca. 20 grader op fra underlaget, og hjælperen skubber brugeren mod fjerneste sengekant, over mod sengehesten.



4C) Nu vendes brugeren om på siden ved hjælp af Master TURNER og lift. Brugeren lejres og liften kobles fra Master TURNER

Master TURNER

Large / X-Large Vendelagen

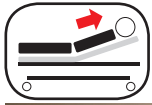

D. Højere op i seng



1D) Elever fodenden på sengen, hovedpuden kan evt. fjernes eller placeres bagved brugerens hoved



2D) Hjælperne stiller sig på begge sider af sengen, og griber fat i Master TURNER. Ved hjælp af vægtoverføring trækkes brugeren højere op i seng. Det er vigtigt at glideflapperne under brugerens ikke er fjernet



E. Op at sidde i seng



1E) Aktiver knækket på sengen ved brugerens knæ



2E) Elever hovedgærdet på sengen




3E) Rul evt. begge sider af Master TURNER ind mod brugeren og ned langs brugerens krop




F. Op at sidde på sengekant



1F) Aktiver knækket på sengen ved brugerens knæ, og elevér hovedgærdet på sengen. Monter liften på Master TURNER'S stropper ved hoveddelen og lift op til Master TURNER er stram bag brugerens ryg. Sænk herefter hoveddelen på sengen

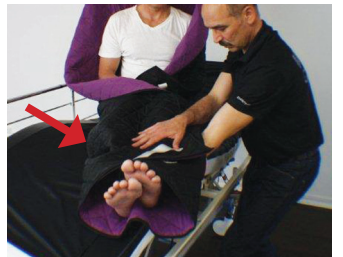

2F) Glid brugerens ben ud over sengekanten

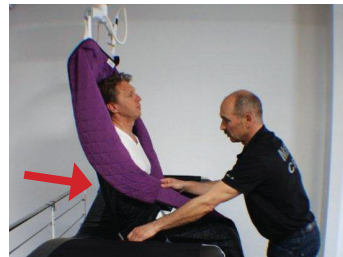

3F) Brugeren sidder nu på sengekanten med Master TURNER som rygstøtte



4F) For at undgå fremadglidning kan den midterste glideflap på madrascoveret skydes tilbage, således mere antiskrid fremkommer

Master TURNER

Large / X-Large Vendelagen



Vaskeanvisning

Master TURNER Soft og Frotté kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling

Master TURNER Two In One og Elastic kan vaskes ved 90 grader C




Kun skånsom tørretumbling



ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

Max. belastning

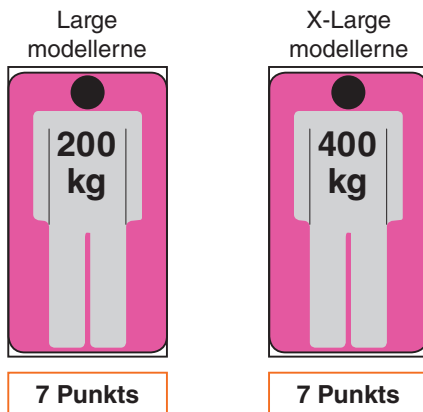

Max. belastning pr. håndtag: 35 kg



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



ADVARSEL

- Forlad aldrig bruger med liften hæftet på Master TURNER.
- Forlad aldrig bruger for tæt på sengemadrassens kant eller siddende ude ved eller på denne med Master TURNER.
- Forlad aldrig bruger liggende på Master TURNER, uden at sengehæste i sider er hævet.
- Anvend aldrig Master TURNER som et løftesejl ved at løfte bruger fra underlaget med denne tilkøbt en personløfter.

Produktbeskrivelse

Master TURNER Soft har en blød hudvenlig jersey overflade, der er flammehæmmende samt elastisk. Er tyndt polstret for at sikre åndbarhed og er vatteret med allergiforebyggende og fugtabsorberende specialfibre, der forebygger dannelsen af svampe og allergi. Master TURNER Soft er specialfremstillet til brug ovenpå trykafastende madrasser og sikrer optimal udnyttelse af madrassens egenskaber.

Master TURNER Frotté er vatteret med Øko-TEX fibre og har en overflade i frotté.

Master TURNER Two In One er tyndt polstret for at sikre åndbarhed og vatteret med allergiforebyggende og fugtabsorberende specialfibre, der forebygger dannelsen af svampe og allergi. For at undgå fugt i at gennemtrænge er systemet forsynet med en indvendig elastisk fugtspærre.

Master TURNER Elastic har en elastisk overflade bestående af PU belagt polyester. Er tyndt polstret for at sikre åndbarhed og er vatteret med allergiforebyggende og fugtabsorberende specialfibre, der forebygger dannelsen af svampe og allergi.

Vendelagnerne har en glat underside i specialfremstillet nylon med unikke glideegenskaber HLF (Hyper Low Friction) samt lang holdbarhed. Vendelagnerne har flere håndtag, som giver mulighed for god håndtering.

Anvendelse

Master TURNER anvendes som et permanent liftbaseret glide- og vendelagen.

Master TURNER Large systemet kan anvendes til både den aktive bruger og til brugeren, der har behov for aflastning under hele kroppen.

Two In One modellen anvendes til inkontinente brugere.

Master TURNER X-Large anvendes til aktive bariatriske brugere samt bariatriske brugere, der har behov for aflastning under hele kroppen.

Master TURNER X anvendes til brugeren, der har behov for aflastning under hele kroppen samt til den tunge bruger, der skal op at sidde på sengekant ved hjælp af loftlift.

Personalet kan ved brug af vendesystemernes håndtag foretage manuelle forflytninger, og hvis bruger er tung eller modarbejdende kan systemet tilkobles en hvilken som helst gulv- eller loftlift. Ved anvendelse af lift ned sættes arbejdsbelastningen for personalet væsentlig og gør forflytningerne mere behagelig for bruger. Som glideunderlag kan systemet anvendes ovenpå alle vores madrasclover modeller i large og X-large.

Fordele

- Soft modellen har en tynd polstring for at forebygge varme.
- Er allergiforebyggende
- Soft modellen er dokumenteret til brug på trykafastende madrasser
- Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlifte
- Giver mulighed for at komme op at sidde på sengekant ved hjælp af loftlift
- Two In One modellen anvendes til inkontinente brugere
- Leveres med mange håndtag for god håndtering
- Har unikke glideegenskaber- HLF (Hyper Low Friction), og er dermed tryksårsforebyggende, da risikoen for shear mindskes
- Large modellerne kan anvendes som evakueringslagen
- Lang holdbarhed