

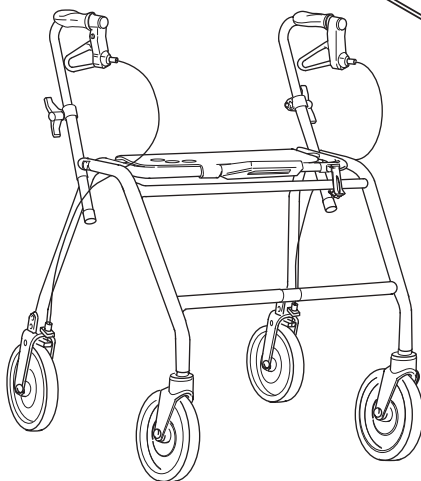


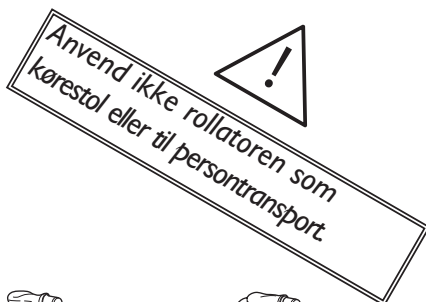

# DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000, MAXI

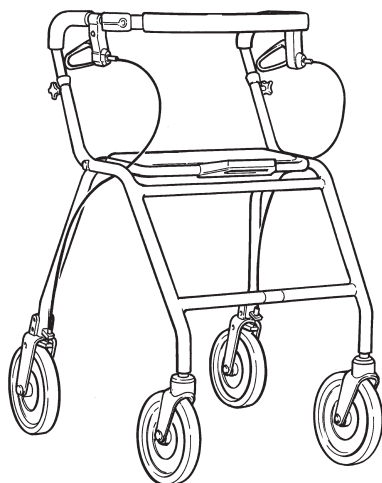

## BRUGSANVISNING

Brugsanvisningen skal gennemlæses omhyggeligt før rollatoren tages i brug.  
Rollatoren er velegnet til både indendørs- og udendørsbrug.



\*TESTAD AV CENTRUM FÖR INDUSTRIELL FORSKNING (SINTEF), NORGE.

## SIKKERHED

- Det er ikke tilladt at stå på rollatoren eller at anvende den til persontransport.
- Stå aldrig på rollatoren.
- Anvend kun sædet til at sidde på.
- Sid ikke og tril rollatoren fremad med fødderne.
- Løft aldrig rollatoren i grebet til sammenfoldning, når rollatoren er i brug.
- Brug ikke rollatoren på trapper eller rulletrapper.
- Når du sidder på rollatoren, skal **begge** bremsen være i parkeringsposition.
- Rollatoren skal være klappet helt ud - sædet skal være klikket på plads og rollatoren må kun anvendes som gangstøtte.
- Vær forsigtig på hældende terræn.
- Vær forsigtig når kurven er tungt lastet.
- Varer må kun transporteres i kurven eller på bakken. Max vægt i kurven er 9 kg og max vægt på bakken er 5 kg.

## TILBEHØR

- A) Montering af kurven.
- B) Montering af bakken med plastplugs.
- C) Opklappeligt sæde.

## OPKLAPPELIGT SÆDE

Sædet er opklappeligt, for at give større bevægelsesfrihed og øge muligheden for at komme tættere på f. eks. kølediske, køkkenskabe o. lign.

## SAMMENKLAPNING

A) **DOLOMITE LEGACY**






B) **DOLOMITE OPAL 2000, MAXI**

1. Løft op i løftespærren.
2. Klapp sammen.

C) Rollatoren er nem at transportere når den er klappet sammen.

## KØREKLAR POSITION

Før rollatoren er køreklar, skal løftespærren trykkes på plads. En kliklyd indikerer at spærren er på plads.

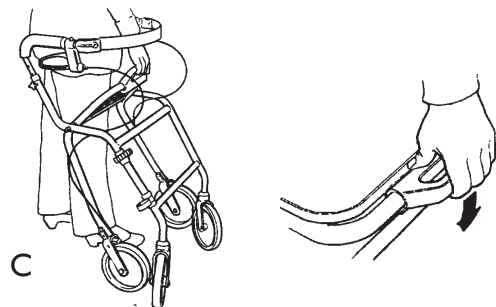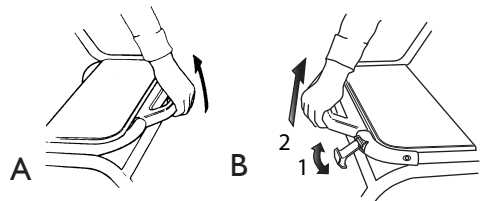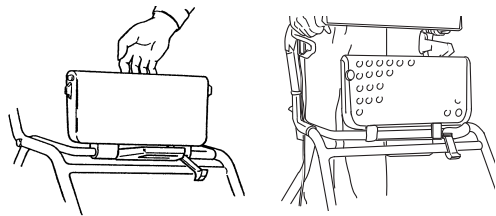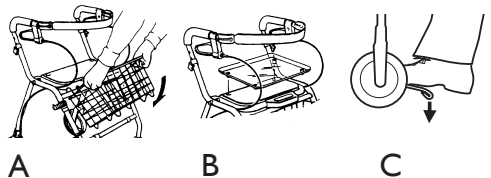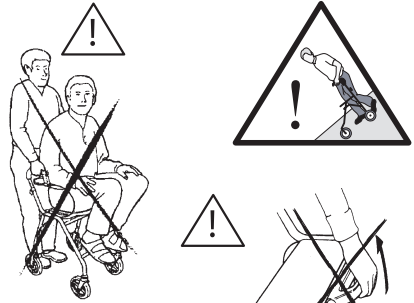

## BREMSE

Træk **begge** bremsehåndtag opad for alm. bremsning.

## PARKERINGSBREMSE

Tryk bremsehåndtaget let nedad til parkeringsposition. Et tydeligt klik indikerer at bremsene er aktiveret. Det er vigtigt at begge bremsesættes i parkeringsposition. For at løse parkeringsbremsen, trykkes bremsehåndtaget opad. Når du sidder på rollatoren skal begge bremses være i parkeringsposition!

## JUSTERING AF BREMSEVIRKNING

Ved nedsat bremseeffekt justeres bremsekablet. Eget værktøj er skruenøgler 8 og 10 mm (medfølger ikke).

## KØREHÅNDTAG

Stå bagved rollatoren og juster håndtagene til ønsket højde.






Normalt skal håndtagene være placeret i håndledshøjde. Ved specielle behov kontaktes terapeuten.

### DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000

**For højdejustering af håndtag med faste indstillinger:** Løsn fingerskruen helt. Tag skruen ud, og juster håndtaget til anvendelig højde. Sæt skruen tilbage i hullet, den skal passe ind i det 6-kantede hul. Sæt fingerskruen tilbage og spænd til.

### DOLOMITE MAXI

**For højdejustering af håndtag med trinløs indstilling:** Løsn vrideren, juster til anvendelig højde og spænd til igen. Kontroller at begge håndtag har samme indstilling.

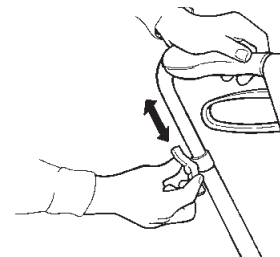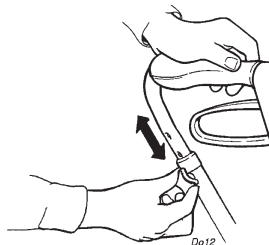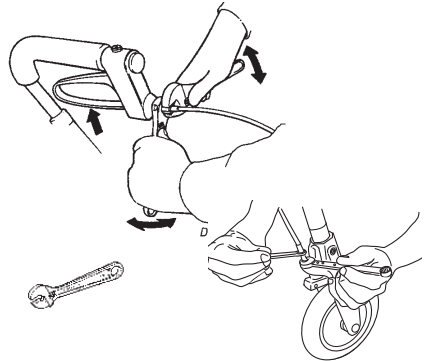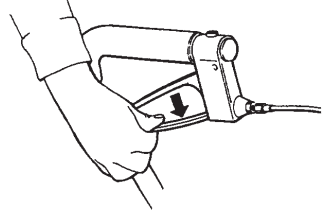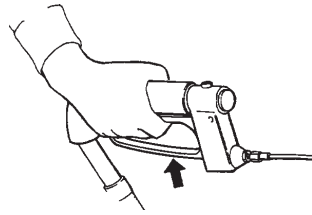

## VEDLIGEHOEDELSSE - SIKKERHED

For at opretholde funktion og sikkerhed skal man regelmæssigt gennemgå følgende:

- Rengør rollatoren med et almindeligt rengøringsmiddel. Tørres efter. Hold hjulene rene.
- **Kontroller at skruer, møtrikker og vridere er forsvarligt spændt til.**
- **Hvis rollatoren ikke er 100 % i orden må den ikke anvendes.** Foretag ikke selv reparationer, men kontakt leverandøren.


**OBS! Rollatoren må kun anvendes som ganghjælpemiddel. Brugerens max. vægt: 125 kg DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000. DOLOMITE MAXI 160 kg.**  
**DOLOMITE** fralægger sig ethvert ansvar for ændringer og reparationer der er foretaget af uautoriseret reparatør.

### ANVISNING FOR DESTRUKTION AF PRODUKT OG EMBALLAGE:

Når produktet ikke skal anvendes mere, skal såvel produkt, tilbehør samt emballage sorteres med henblik på korrekt bortskaffelse. De enkelte dele kan adskilles og håndteres i henhold til materialefortegnelsen eller leveres retur til INVACARE A/S, som har en returoordning for alle solgte produkter.

På etiketten på **DOLOMITE LEGACY, OPAL 2000** og **MAXI** findes al vigtig teknisk information.

1. Varenummer.
2. Produktnavn.
3. Serienummer.
4. Fabrikationsdato.
5. Max brugervægt.
6. OBS! se brugsanvisningen.
7. Indendørs-udendørs rollator.
- 8: Maks. bredde på rollator
- 9: Producentens navn

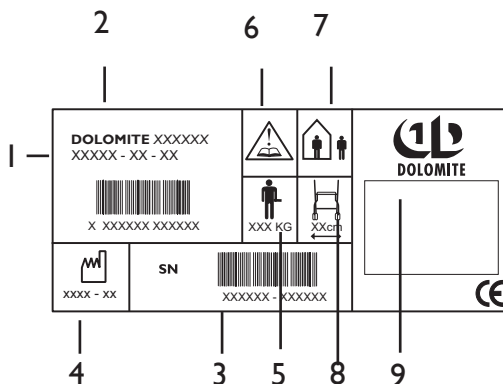

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99

[www.dolomite.biz](http://www.dolomite.biz)

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 39, DK-2605 Brøndby  
TEL (45) (0)36 90 00 00, FAX (45) (0)36 90 00 01  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)