


9200/9300 personløfter vejledning for bruger/hjælper

Max. belastning 150 kg

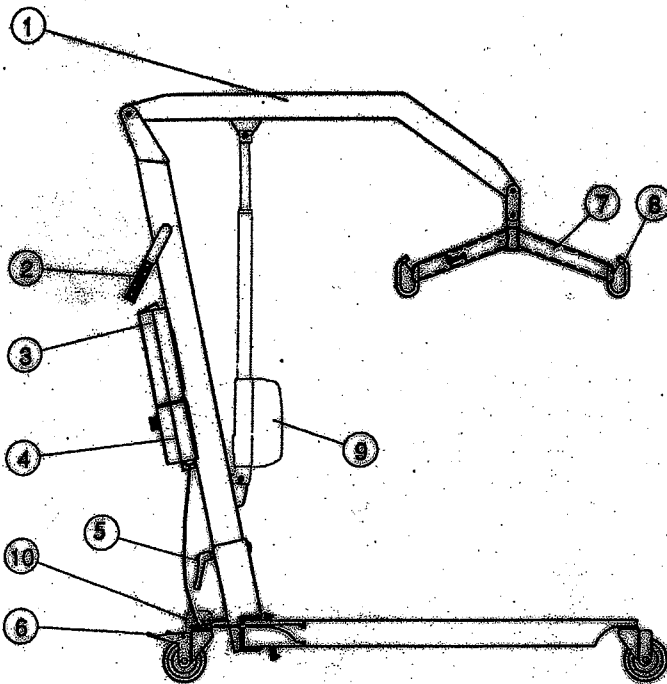


Personløfter:

- 1 Løftearm
- 2 Håndgreb
- 3 Batterikasse
- 4 Kontrolboks
- 5 Håndskruer til aftageligt tårn
- 6 Bremse
- 7 Løftebøjle
- 8 Sikkerhedsclips
- 9 Løftemotor
- 10 Benspredningsmotor

Kontrolboks:

- 1. Monteringsskrue. Løsnes ved skift af kontrolboks.
- 2. Nødstop. Tryk for nødstop. Drej til højre for at afmelde nødstop.
- 3. Nødkørsel op/ned. Trykkes ind med spids tynd genstand
- 4. Stik til håndbetjening.
- 5. Stik til løftemotor.
- 6. Stik til benspredningsmotor.
- 7. Stik til lader.

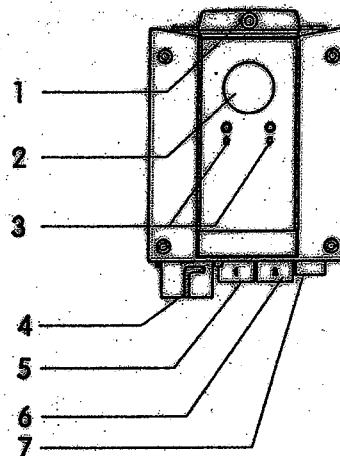


Afmontering af tårn:

Tag stikket til benspredningsmotoren ud. Løft batteriet af.
Løsn den store håndskruer. Tårnet kan nu løftes af.

Montering af personløfter:


Når personløfteren samles igen, skal tårnet stødes helt i bund, og håndskruen skal strammes godt. Sæt stikket og batteriet i.

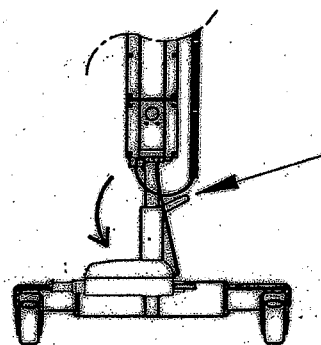


lifing Care - lifing A/S
Sofienlystvej 9 · DK-8340 Malling
Telefon 87-47 87 47 · Telefax 86 93 35 09
Giro 981 3896 · PBC-nr. 0078 0677
A/S nr 108670

lifing Deutschland GmbH
Lederstraße 26 · D-22525 Hamburg
Telefon 040 / 54 17 66 · Telefax 040 / 54 18 64
Geschäftsführer Herr Finn Pedersen
Amtsgericht: Hamburg · HRB 66943

Hæve og sænke:

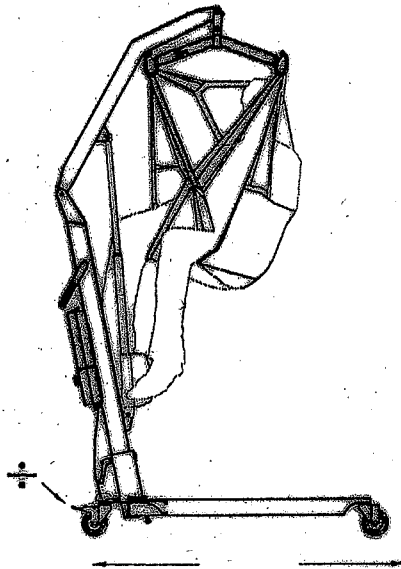

Håndbetjening:

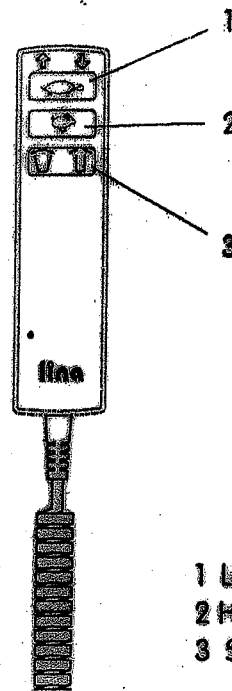


- 1 Langsom hæve/sænke
- 2 Hurtig hæve/sænke
- 3 Samle/sprede understel

Hjulene må ikke være bremsset mens der løftes eller sænkes.

Løfteren skal kunne bevæge sig efter brugerens tyngdepunkt for at opnå et optimalt sikkerhedsniveau.

Sejlstropper:

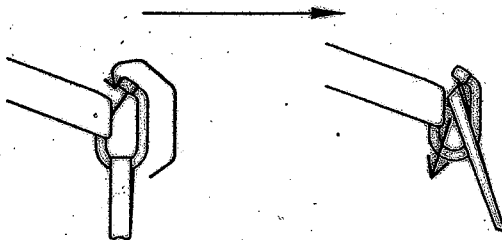


Sejlstropperne kan tages af med kun én hånd.

1. Før stroppen op og drej rundt som vist med pilen.
2. Ryk nedad.

Pas på, at løftearm og løftebøjle ikke rammer brugerens hoved, når sejlstropperne placeres i løftekrogene.

lina



At køre med løfteren:

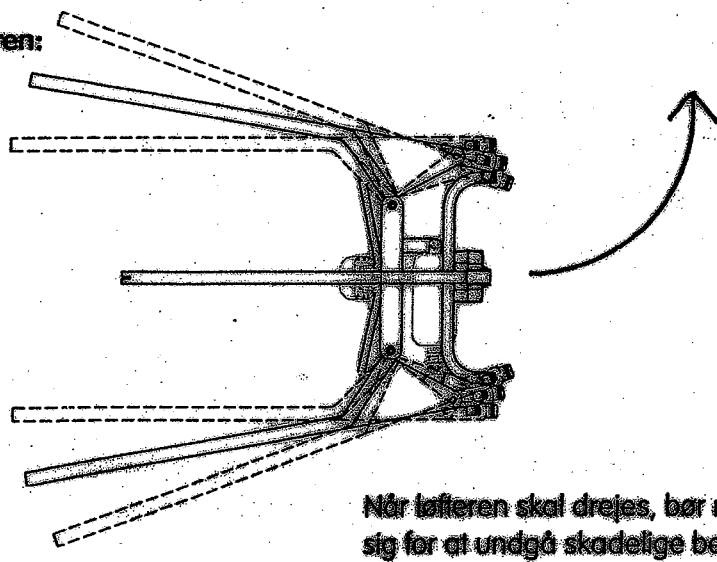

Når løfteren skal drejes, bør man trække den efter sig for at undgå skadelige belastninger af ryggen.

Krænkingsstabilitet:

For at opnå optimal stabilitet bør løfteren køre med halvt spredt understel hvor pladsforholdene tillader det.

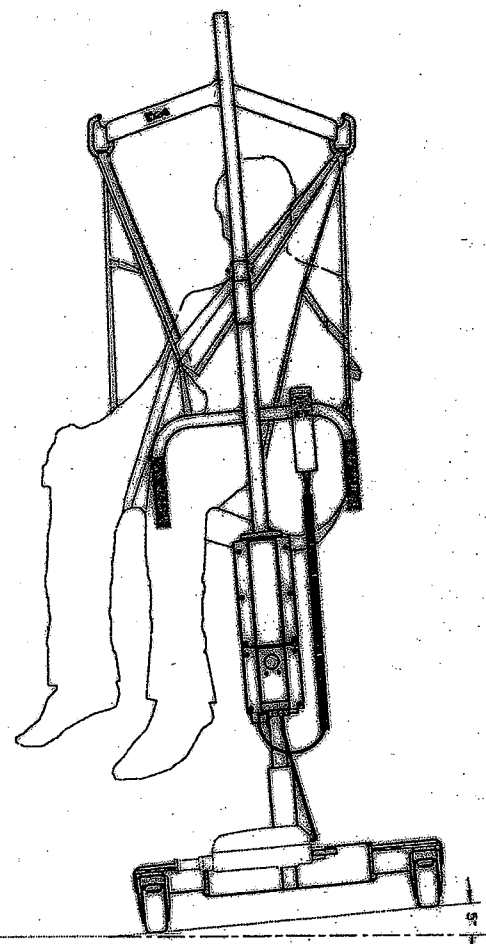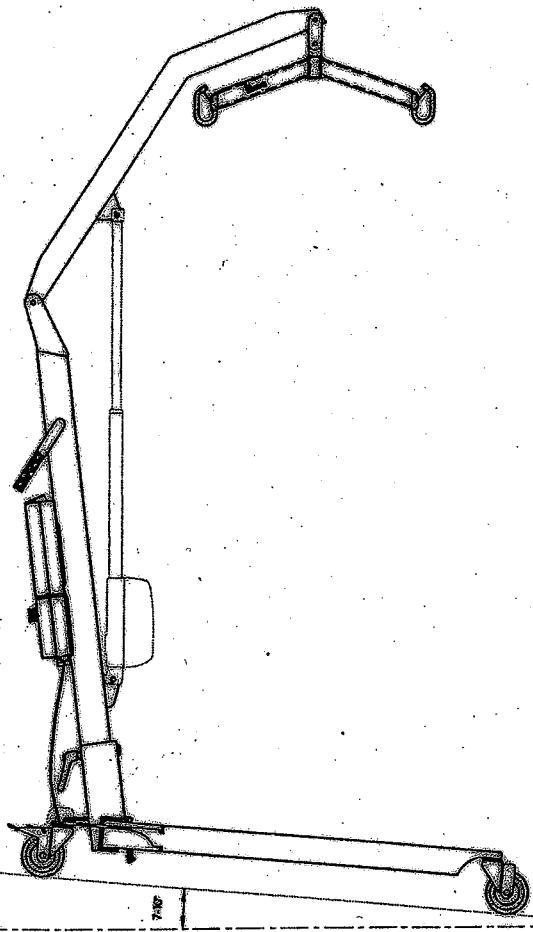

Løfteren kan krænge 7° fremad med spredt understel og 10° med samlet understel.

Løfteren kan krænge 5° til siden med samlet understel.

(Max. fald på badeværelsesgulve er normalt under 2°)

lina

Riko Care - lina A/S
Strandvej 1 P - DK-8340 Malling
Telefon 87 47 87 47 - Telefax 80 40 27 26
CVR 251 8281 - BIC 4007 0627

lina Deutschland GmbH
Lodenweg 28 - D-22525 Hamburg
Telefon 0410 1 54 17 68 - Telefax 0410 1 54 10 64
Gesamtdirektor Herr Finn Pedersen

Kontrolpunkt:

Hvis den elektriske betjening ikke fungerer så kontroller, at

- nødstopet ikke er aktiveret
- batterikasse er opladet
- stikkene er rigtigt tilsluttet

Rengøring:

Bevægelige dele skal holdes fri for snovs, fjern hår og lign. fra hjulene. Løfteren kan afvaskes med almindeligt, mildt rengøringsmiddel. Ved grundig rengøring kan løfteren overbruses, men batteriet skal først tages af.

Opladning:

Løfteren kan oplades så ofte det ønskes, normalt en gang i døgnet eller efter ca. 35 løft. Hyletone ved betjening viser, at batteriet trænger til opladning. En hurtigoplader til montering på væggen kan leveres.


Ladeanvisning

1. Tag det sorte kabel:

Stik ladestikket i stikkåsen under kontrolboksen og stikket i stikkontakten.

2. ON. Den grønne lampe lyser: stikkontakt er tændt.

3. CHARGE: Den gule lampe lyser: der bliver ladet, lampen slukkes når der er fuldt opladet.

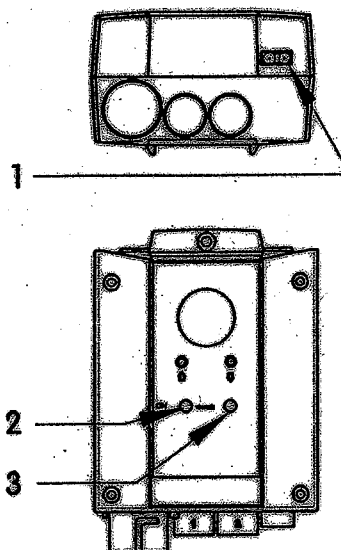

Daglig kontrol:

Batteriet skal være ubeskadiget og opladet. Kontroller at der ikke er spillerum imellem løftearm og tårn. De bevægelige dele skal altid være rene.

Årlig kontrol:

Drejepunktet for løftearmen og løftebjælken skal kontrolleres. Kontroller at hjulene stadig er monteret korrekt. Alle møtrikker og bolte skal efterses. Alle bevægelige dele skal smøres.