



Silk MASTER[®]



The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System

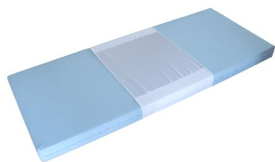

Art. nr. MC 001-1939
Hmi nr. 39116
Silk MASTER Small
Størrelse: L 70 x B 210 cm

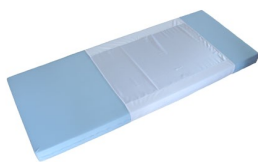

Art. nr. MC 001-1940
Hmi nr. 33244
Silk MASTER Medium
Størrelse: L 100 x B 210 cm



Art. nr. MC 001-1945
Hmi nr. 33245
Silk MASTER Large
Størrelse: L 150 x B 210 cm





Art. nr. MC 001-1946
Hmi nr. 38934
Silk MASTER X-Large
Størrelse: L 200 x B 210 cm

Art. nr. MC 001-1839
Hmi nr. 42491
Silk MASTER Inkontinens
Small
Størrelse: L 70 x B 210 cm

Art. nr. MC 001-1840
Hmi nr. 42493
Silk MASTER Inkontinens
Medium
Størrelse: L 100 x B 210 cm

Art. nr. MC 001-1845
Hmi nr. 42494
Silk MASTER Inkontinens
Large
Størrelse: L 150 x B 210 cm

Når mobiliteten forringes ...

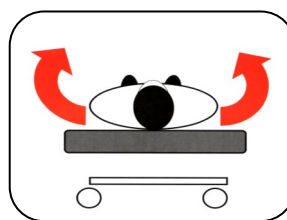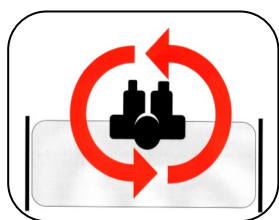

... forbedrer vi livskvaliteten !


Silk MASTER[®]

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System




BRUGERVEJLEDNING

A. Placering af diverse størrelser af Silk MASTER

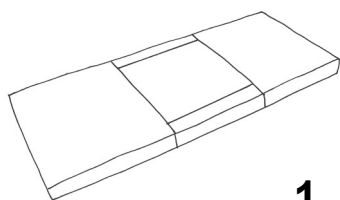


1

Model Small er et 1 punkts glidelagen og monteres på sengens midte, således at den dækker hoftepartiet.

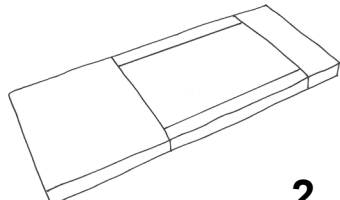


2

Model Medium er et 2 punkts glidelagen og monteres fra sengens midte og op mod sengens hoveddel, således at den dækker hofte og skulderparti.

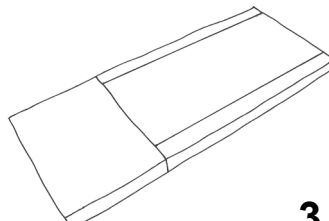

3


Model Large er også et 2 punkts glidelagen og dækker fra hoved til knæ på sengemadrassen.

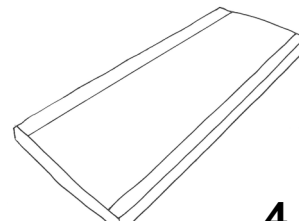

4


Model X-large er et 3 punkts glidelagen og dækker hele sengemadrassen.

B. Montering af Silk MASTER rundt om sengemadrassen

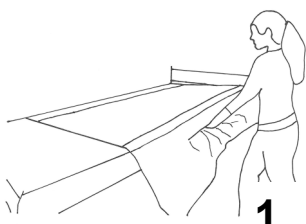


1

Indstil sengen i passende arbejds-højde. Før begge ender i siderne ind under sengemadrassen.

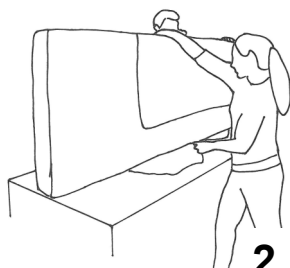


2

Vær to personer til at løfte madrassen op på højkant og træk den hen til den person, som skal fastgøre enderne for at få kort rækkeafstand. Træk Silk MASTER's ender sammen.

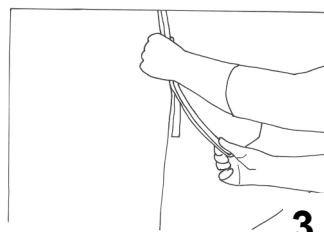

3


Stram passende til og fastgør enderne ved brug af de påmonterede velchrolåse.

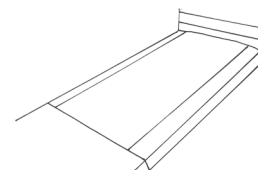

4

Silk MASTER ligger nu fast. Derved undgår man at det løsner i sider og danner folder under brugeren.

C. Delvis aktiv bruger sidder på sengekant, drejer ind og vender om i sideleje

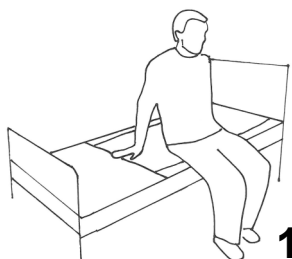


1

Tilpas højden på sengen. Sæt dig på sengekanten. Støt overkrop med begge arme, samtidig med, at du læner dig en smule bagover.



2

Har du en smule svært med balance i overkroppen og har en el-seng, kan du læne dig op af hoveddelen ved at hæve denne.

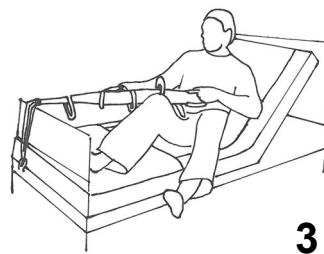

3

Løft benparti og drej dig nu ind i sengen ved at udnytte den glatte overflade på Silk MASTER. Som ekstra hjælp kan Master CARE Sengebånd anbefales. (Det kan være en god ide at bruge knæ-knækket på sengen. Undgå derved at glide for langt ned i sengen.)



4

Flyt det ene ben over. Har sengen sengehest, griб da fat i denne og foretag vending ved skiftevis at glide og flytte hofte mod den glatte overflade på Silk MASTER, indtil du ligger om på siden.


Silk MASTER[®]

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System




BRUGERVEJLEDNING

D. Forflytning på Silk MASTER med en hjælper

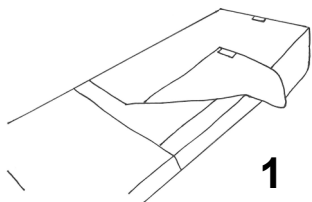


1

Hvis bruger liggende på Silk MASTER har behov for hjælp, anbefaler vi MC 001-xxx Silk MASTER Stiklagen som placeres ovenpå Silk MASTER.

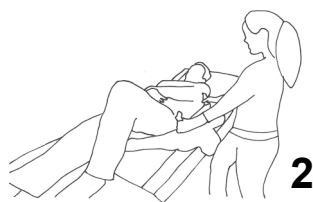

2

Indstil sengen i passende arbejdshøjde. Grib fat i Stiklagnet ved at benytte "melsække greb".

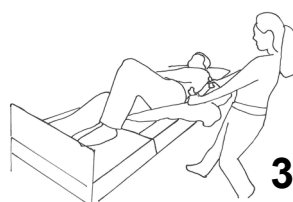

3


Træk ved hjælp af vægtoverføring bruger ud mod dig ved at stiklagnet glider mod Silk MASTER's overflade.



4

Vend derefter bruger endeligt om op siden ved hjælp af vægtoverføring.

E. Forflytning på Silk MASTER med inkontinent bruger med en hjælper

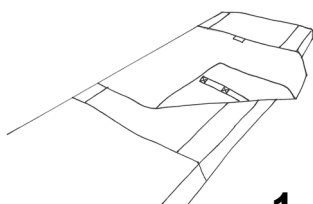


1

Placér Silk MASTER Inkontinensunderlag ovenpå Silk MASTER med etiketten "DENNE SIDE OP" vendt opad mod hoveddelen. Den glatte underside skal vende ned, og glider derved mod Silk MASTER's glatte overflade.



2

Indstil sengen i passende arbejdshøjde. Bruger er placeret på Inkontinensunderlaget. Hjælper tager fat i håndtag på Silk MASTER Inkontinensunderlaget og trækker ved hjælp af vægtoverføring bruger ud til siden.

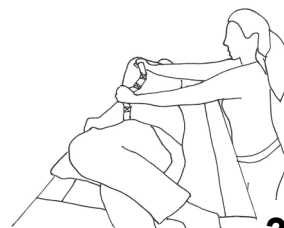

3

Hjælper tager derefter fat i håndtag på Silk MASTER Inkontinenslagen og ruller bruger om i sideleje ved hjælp af vægtoverføring.


Når bruger er blevet for tung eller for passiv anbefaler vi at gå over til Det Originale Master TURNER Liftbaserede glide- og vendesystem.

F. Sidde op på sengekant (delvis aktiv bruger med god balance)



1


Bruger ligger i sideleje. Hovedgærdet hæves. Ligger bruger på Silk MASTER Stiklagen griber hjælper fat i dette ved brugers knæ ved brug af melsækkegreb og trækker i det. Herved drejes bruger ved hofte. Bruger svinger ben ud over sengekanten og kommer herefter op at sidde.

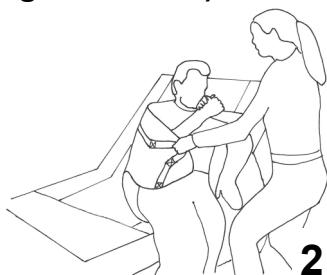

2

Ligger bruger på Silk MASTER Inkontinenslagen griber hjælper fat i håndtagene. Herved hjælpes bruger til at dreje på underlaget. Benpartiet drejes ud over sengekanten, samtidig med at hjælper støtter overkroppen ved at gribe i håndtag på Silk MASTER Inkontinenslagen.

G. Sidde op på sengekant med el-seng (delvis aktiv bruger med dårlig balance)

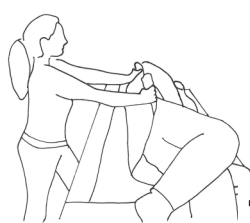

1

Sørg for at brugers hofte er placeret, hvor sengen knækker ved hofteparti. Vend derefter bruger liggende på Silk MASTER Stiklagen ved hjælp af dette om i sideleje med hovedet ud til den side bruger skal op at sidde.



2

Hæv sengens hoveddel, skiftevis med at hjælpere støtter og drejer ben parti ud over sengekanten samtidig med at hjælpere holder overkroppen med Silk MASTER Stiklagenet, indtil bruger sidder helt op.

Silk MASTER[®]



The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System

Beskrivelse af de forskellige modeller

(1) Silk MASTER

Består af et madrascover, som er glat på midten, hvilket gør at bruger glider lettere end på et almindeligt lagen. Anvendes til brugere med nedsat funktionsevne pga lammelse, problemer med ryg, bækken, hofte, ben mm., og som derved har svært ved at vende sig i sengen.

(2) Silk MASTER Inkontinens

Består af et madrascover, som er glat på midten, hvilket gør at bruger glider lettere end på et almindeligt lagen. Det har indvendig inkontinens fugtabsorberende egenskaber, for inkontinente brugere. Anvendes til brugere, som har svært ved at vende sig i seng pga. lammelse, problemer med ryg, bækken, hofte, ben mm.

Vaskeanvisning

Silk MASTER kan vaskes ved 95 grader C.



Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Produktbeskrivelse

Silk MASTER består af et madrascover, som påmonteres rundt om sengemadrassen ved brug af dets velchrolåse. Silk MASTER's sider er af et specielt elastisk materiale, så det former sig til ændringer i madrassen. Dette bevirker, at silk MASTER altid vil ligge stramt på madrassen, så man undgår dannelse af folder under bruger.

Den midterste del af Silk MASTER består af et glat polyestermateriale. Hvis brugeren har behov for hjælp, kan et Silk MASTER stiklagen bruges til at trække med.

Silk MASTER Inkontinens består af et glat polyestermateriale med indvendig inkontinens fugtabsorberende egenskaber. Hvis brugeren har behov for hjælp ved vending, kan et Silk MASTER Inkontinensunderlag anvendes.

VIGTIGT

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk