

Sling VEST[®]



The ORIGINAL Slide cushion for slings

PAT/PEND/201000218/Europapatent





- Art. nr. MC 003-9040
Hmi nr. [48844](#)
Sling VEST Medium Basic
Størrelse: L 70 x B 50 cm



- Art. nr. MC 003-9041
Hmi nr. [55719](#)
Sling VEST Large Basic
Størrelse: L 75 x B 60 cm

Når mobiliteten forringes ...

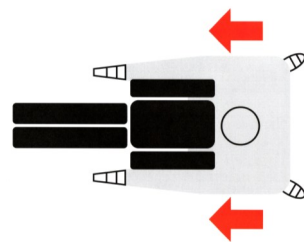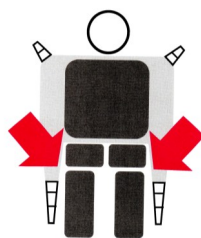

... forbedrer vi livskvaliteten !


Sling VEST



The ORIGINAL Slide cushion for slings


BRUGERVEJLEDNING

A. Placering af Sling VEST på løftesejl

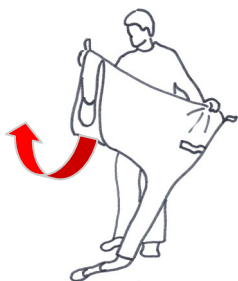


1

Løft den ene fodstrop op på løftesejlet og hold denne sammen med sejlet.

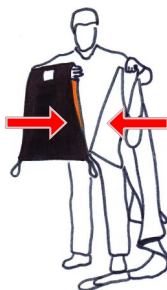

2

Før Sling VEST ind over løftesejlet. Sørg for at den brede del med håndtag vender nedad.

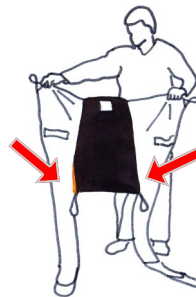

3

Slip derefter fodstroppen og Sling VEST er nu placeret.

B. Placering af løftesejl med Sling VEST i stol



1

EN HJÆLPER.

Stil dig bag kørestolens ryg. Hold Sling VEST og løftesejl sammen, stram til og skyd sejlet ned mellem brugers ryg og stolryg ved først at starte diagonalt ned mod den ene side.




2

Hold sejlet strakt ud og skyd den derefter ned mod den anden side og forsæt skiftevis med dette, indtil sejlet er placeret ned mod brugerens lænd.



3

Før derefter hånden ind i Sling VEST og skyd denne ned og rundt ved hofter i hver side. Hvis muligt, fjern armlæn for bedre at komme til.

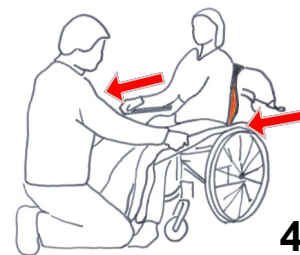

4


Træk afslutningsvis i løftesejlets benstropper siddende foran bruger. Derved glider det helt på plads.



5


TO HJÆLPERE.

Hjælpere stiller sig på hver side af kørestolen. Løftesejlet og Sling VEST holdes stramt sammen.

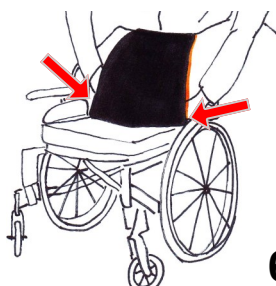

6

Hold sejlet i sider og før hænder ind i Sling VEST fra siderne

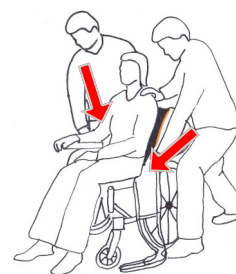

7

Sling VEST med løftesejlet skydes nu ned mellem bruger og kørestolens ryg.



8

Hvis muligt tag armlæn af kørestolen og skyd Sling VEST med løftesejlet endeligt på plads rundt om brugerens hofter i sider.

Sling VEST




The ORIGINAL Slide cushion for slings

BRUGERVEJLEDNING


C. Fjerne Løftesejl med Sling VEST fra stol




1
Før benstropper ned og tilbage i sider.

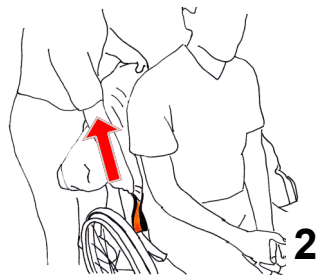

2
Træk løftesejlet op. Dette vil nu glide indeni Sling VEST og op mod kørestolens ryg.

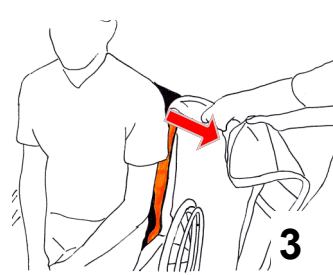


3
Hold sejlet foldet sammen og lad det glide ud til den ene side. Den anden hjælper holder igen på Sling VEST's kant i modsatte side.

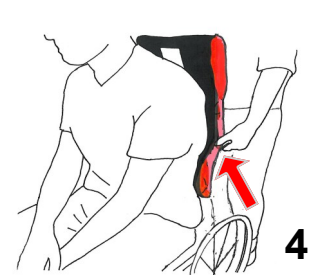


4
Grib fat i de sider nederst på Sling VEST, der vender ind mod kørestolens ryg og rul denne op, som når man fjerner en rørførmet glidepude. Sling VEST fjernes meget nemt.


D. Placering af Sling VEST ved brug af Master TURNER DUO Delbart Glide- og vendelagen.

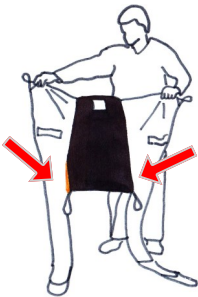


1
Placer Sling VEST på løftesejlet som vist Fig. A Punkt 1-3.

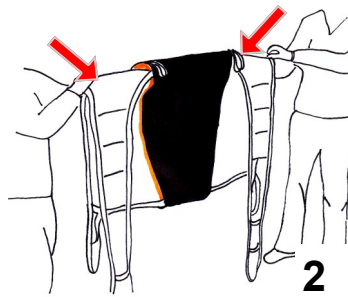


2
Hjælperen fører håndflader ind i sejlet ved hofteparti og folder dette således at benstropper falder ned til den anden side.

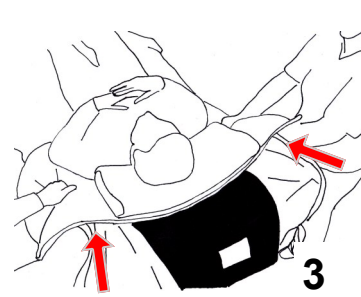


3
Løft den øverste del af Master TURNER DUO op og hold i den med den ene hånd. Påbegynd at glide sejlet ned på plads mod brugerens lænd ved at skyde sejlet mellem den glatte Master TURNER DUO og madrascoveret.

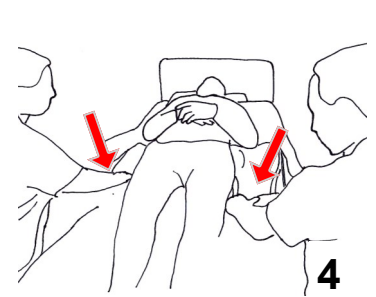

4
Skil bundstykket fra topstykket på Master TURNER DUO og rul afslutningsvis bundstykket nedad og ned under brugerens knæ.

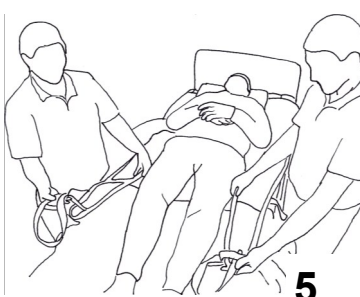


5
Før benstropper ned langs sider og placer endeligt løftesejlet ved at trække dette på plads i sider ved brugerens hofter.

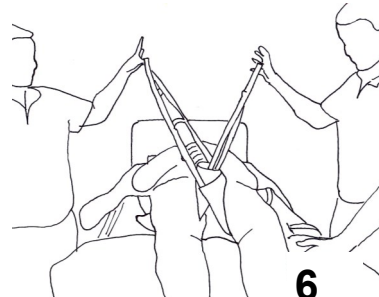

6
Brug gerne MC 003-9031 Sling SOCK for nemmere at føre løftesejlet under brugerens ben og gør endeligt klar til at løfte. Topstykket følger nu med og kan nemt fjernes, når bruger sidder i stolen.

E. Fjerne Sling VEST

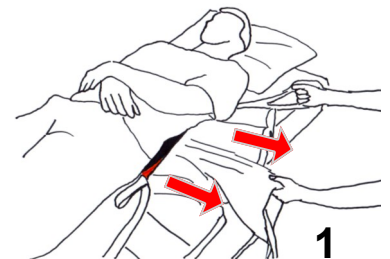

1
Løftesejlet kan nemt fjernes fra Sling VEST ved blot at trække dette ud til den ene side, mens den anden hjælper holder igen i kant på Sling VEST i modsatte side. Afslutningsvis rulles eller trækkes Sling VEST ud under bruger.

Sling VEST



The ORIGINAL Slide cushion for slings

Beskrivelse af Sling VEST® BASIC

Sling VEST® BASIC

Består af et polstret hylster med glat yder- og inderside.

Glidematerialet er af specialfremstillet PU belagt nylon HLF (Hyper Low Friction) varemærke, der kendetegner unikke glideegenskaber og lang holdbarhed.

Vaskeanvisning

Sling VEST kan vaskes ved 80 grader C.



Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten

Max. Brugervægt

Personvægt: 250 kg



VIGTIGT

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Sling VEST® består af et polstret glidestykke formet som et hylster. Løftesejlet føres ind i Sling VEST®, således at dette bliver glat ved rygdel. Herved kan sejlet meget nemmere placeres og fjernes under liggende eller siddende bruger. Dette uden friktion eller at hjælpere skal løfte. Sling VEST® giver høj komfort og forebygger ydermere at løftesejlet skærer ind bar hud ved brugerens sæde.



Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk