

# QUICKGUIDE TRITON/DUAL

## Bade- og toiletstol (max brugervægt 150 kg)

OP 

NED 

TRANSPORT 

Positionerer stolen til sikker forflytning

GEM 

INDSTIL stolen i den ønskede position.  
HOLD S + 1 eller 2 inde i to sek.  
Når du hører et BIP, er den ønskede position gemt i hukommelses-knap 1 eller 2.

TRITON/DUAL

WINCARE  
N O R D I C

 TILT FORLÆNS  
Justerer sædevinklen op til +7°

 TILT BAGLÆNS  
Justerer sædevinklen ned til -30°

1  HUKOMMELSE 1  
Se vejledning under 'GEM'

2  HUKOMMELSE 2  
Se vejledning under 'GEM'



**TIP!**  
Brug stolens hukommelsesfunktion til hurtig og præcis positionering, fx til hårvask eller toiletbesøg.

### NØDSTOP OG NØDFIR (tilbehør)

Et fabriksmonteret nødstop og nødfir er tilgængeligt som tilbehør, hvis det ønskes.

#### ● Nødstop

Tryk for at stoppe.  
Drej for at nulstille.

#### ● Nødfir

Bruges til at sænke sædet, hvis fx håndbetjeningen er defekt.

### BATTERI



Op til 100 løft pr. opladning.  
Det anbefales at oplade regelmæssigt, fx om natten.



Akustisk varsel ved lavt batteri.

### LED-INDIKATOR

Lys      Betydning

-  Gult: Oplader
-  Intet: Fuldt opladt



WINCARE  
N O R D I C

