

ZIBO**BRUGERVEJLEDNING****PM 171. HMI NR. 64225****DYNAMISK TOPMADRAS**

TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M. STADIE 3

Installation og start

1. Læg madrassen på sengebunden. Fastgør madrassen til den bevægelige del af sengebunden med de 3 bændler på begge sider. Vær opmærksom på fodenden.
2. Hæng pumpen på endegavlen (fodenden), ved hjælp af to ophæng, eller stil pumpen på et fast underlag ved siden af sengen.
3. Klik slangerne fra madrassen fast på pumpen. Når der høres et "klik", er slangerne koblet korrekt på pumpen.
4. Sæt stikket i og tænd for pumpen.
5. Pumpen fylder madrassen. Der kan ikke stilles på pumpen før madrassen er fyldt.
6. Når madrassen er helt fyldt (fast) vil pumpen gå på alternerende og stille sig på sidst indstillede komfort.
7. Indstil komforten i madrassen ud fra brugerens vægt. (Se vægtskala). Madrassen vil langsomt indstille komforten.
8. Indstil den ønskede Therapi funktion.

1. **Tryk/komfort** regulering. Indstil efter brugerens vægt og ønske komforten. Brug vægtskala som rettesnor. Lav altid HÅNDETEST
2. **Terapiform. Indstil** den ønskede terapi ved at trykke på knappen til der er lys ved det ønskede.
 - **AUTOFIRM**, bruges ved pleje/vende. Madrassen bliver hel fast/hård så det er lettere at arbejde. Denne funktion holder i 20 min., så vender den tilbage til alternerende og komfort indstillingen som den stod på.
 - **ALTERNATE**, vekselrykfunktion
 - STATISK**, stille stående/statisk funktion. Den kan holde i 20 min. så vender den tilbage til alternerende.
 - SEAT INFLATION**, sidde funktion. Hvis brugeren har behov for mere stabilitet i den siddende stilling. Hele madrassen bliver lidt fastere. Kan vælges med alternerende eller statisk funktion.
3. **ALARM MUTE**. Hvis der opstår en fejl kan det høres og ses. Lyden kan slås fra ved at trykke på alarm mute. Hvis fejlen ikke rettes i løbet af ca. 5 min. kommer lyden igen.