



**ZIBO**

**BRUGERVEJLEDNING**

**PM 211**

**DYNAMISK HELMADRAS**

TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M. STADIE 4

### **Installation og start**

1. Læg madrassen på sengebunden. Fastgør madrassen til den bevægelige del af sengebunden med de 2 bændler på begge sider, og 2 ved hovedgærdet. Vær opmærksom på fodenden af madrassen
2. Hæng pumpen på endegavlen ( fodenden), ved hjælp af to ophæng.
3. Klik slangerne fra madrassen fast på pumpen. Når der høres et ”klik”, er slangerne koblet korrekt på pumpen.
4. Sæt stikket i og tænd for pumpen. Der skal tændes både på siden og på frontpanelet.
5. Pumpen fylder madrassen. Autofirm lyser til madrassen er fyldt.
6. Indstil pumpen i følgende rækkefølge:
  - a. **Therapy** indstilles til alternate(dynamisk)
  - b. **Comfort** indstilles efter brugerens vægt brug piletasterne til den ønskede indstilling er nået, vejledende vægtskala hænger på pumpen.
  - c. **Cykle time** indstilles, 10 er mest brugt.
7. Når madrassen er helt fyldt, vil pumpen starte på de indstillede funktioner, og Autofirm slukker
8. Ønsker man at ”låse” pumpen for at undgå uønskede ændringer, tryk da på PANEL LOCK i 2 sek. og der tænder et grønt lys. For at låse op igen trykkes igen i 2 sek. til det grønne lys slukker. Der kan låses når Autofirm slukker.